

# ML COMBI SHORT

Kikkert system til kort afstand



**FORSTØRRELSE:**

3x eller 4x

**SYNSFELT:** 36° & 42°

**VÆGT:** 10 gram

**KORREKTIONS GRÆNSE:**

Sf.+18 Cyl. -10 dioptr

**ARBEJDSAFSTAND:**

ML Combi Short 3: 11 - 12 cm

ML Combi Short 4: 7 - 8 cm

ML Combi Short er et nyt kikkert system til monokulært brug på kort afstand.

Systemet er meget let og har en forstørrelse på 3x eller 4x. Da dette er et kikkert system, muliggør det en længere arbejdsafstand end ved et aplanatisk system med samme forstørrelse.

Derudover kan ML Combi Short nemt kombineres med individuelle korrektioner for at optimere synsoplevelsen.

On Sight Vision Aps



 **MULTILENS**  
OPTICAL SOLUTIONS

## FORSTØRRELSE

ML Combi Short eksisterer i to forskellige forstørrelser:

ML Combi Short 3 (forstørrer 3x)

ML Combi Short 4 (forstørrer 4x)

Forstørrelsen af optik er tilpasset korte afstande, baseret på en arbejdsafstand på 25 cm. Hvis du mindsker afstanden, øges forstørrelsen.

En anden måde at forstørre på er at bruge et Galilei system, som giver en systemforstørrelse.

I ML Combi Short har vi kombineret disse to forstørrelsesmetoder og opnået en total forstørrelse på 3x og 4x.




## ARBEJDSAFSTAND

ML Combi Short 3: 11-12 cm

ML Combi Short 4: 7- 8 cm


ML Combi Short 3 og 4 giver en lidt længere arbejdsafstand på grund af deres teleskopiske design i forhold til et aplatisk system med samme forstørrelse.

## SYNSFELT

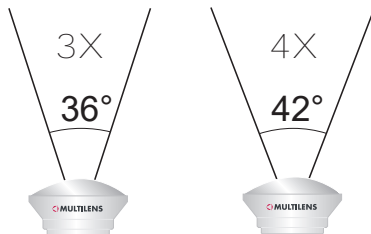

## BAG-KORREKTION

Med Combi Short systemet er det enkelt at tilføje filter eller anden korrektion. Sæt blot den sorte korrektionsring bagpå og tryk den 22 mm korrektionslinse fast i ringen. Det er ikke nødvendigt at anvende skruer eller andet værktøj.

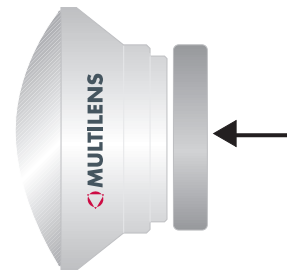


## MONOCULÆRT

Dette system er beregnet til korte læseafstande og bør kun anvendes til monokulært brug.

## DESIGN

Designet af kikkerthuset reducerer det såkaldte ring-scotom. Det vil sige at mindre materiale er i vejen i det perifere synsfelt. Dette forbedrer komfort, sikkerhed og orientering for brugeren.

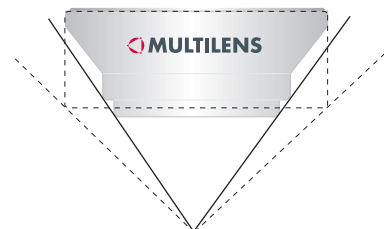

## TEST SÆT

Der findes et test sæt med to grundlæggende systemer til ML Combi Short 3 og 4 i en oculus ring. Prøvesættet leveres i et sort etui med en speciel indsats til maksimalt fem forskellige basissystemer.



## LETMONTERET

At montere ML Combi Short er enkelt. Monteringslinsen sammen med den specielle monteringsdel gør det lige så enkelt at indslibe, som et CR-39 lagerglas. Systemet presses ind i monteringslinsen med høj præcision. Ingen skruer eller værktøj behøves. Denne monteringslinse system bliver også anvendt ML Vidi, ML Combi, ML Focus and ML A2.



## TOLERANSE

Da okularlinsen er stor, er den præcise placering af systemet ikke så kritisk, som for andre stærke optiske kikkerter. En ældre person kan derfor let anvende det uden nøjagtige justeringer.

## PERIFERT

Designet af ML Combi Short gør det muligt at se ved siden af systemet, hvis det er nødvendigt. Derfor kan man tilmed få monteringslinsen leveret med korrektion. Specielt til brugere med Myopi er dette værdsat.

## FILTER

Præcis som alle øvrige Multilens produkter kan ML Combi Short leveres med Filter indlagt i systemet; enten som farvet planlinse eller farvet korrektionlinse placeret bagtil i den sorte korrektionsring.

